

UNA NUOVA SOLUZIONE PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

UNA NUOVA SOLUZIONE PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE Kit di costruzione della seduta individuale Perfetta ricostruzione delle forme anatomiche



Perchè Impulso ?

- **FAVORISCE LA PROPULSIONE A PIEDE**
- **ADATTABII F**
- **CONFORTEVOLE**



KIT STRUTTURALE MODULARE E MODIFICABILE A DENSITÀ DIFFERENZIATA



KIT DI IMBOTTITURA CONFORTEVOLE E **PREVENTIVA**



FACILITA LA PROPULSIONE A PIEDE

INDICAZIONI CLINICHE / DESTINAZIONE D'USO

L'unità posturale bacino Inserto Seat Impulso è consigliata preferibilmente ma non esaustivamente per utenti non deambulanti o parzialmente deambulanti, con discrete deformità e con instabilità e disallineamento posturale quali emiplegici/emiparetici, diplegici/diparetici, amputati, utenti con stati patologici dell'anca e/o della articolazione coxo/femorale in particolare:

PTS Pelvic Total Support

- Che presentano asimmetrie, colpi di vento, obliquità e rotazioni pelviche, anteroversioni e retroversioni pelviche, limitazioni della adduzione/abduzione, flessione/ estensione, rotazione interna/esterna delle gambe;
- Che necessitano di un intervento di allineamento e/o stabilizzazione frontale, sagittale e/o trasverso del bacino;
- Che necessitano di sospensione ischiatica, trocanterica, coccigea ;
- Che sono soggetti ad un medio/alto rischio di sviluppare piaghe da decubito;
- Che necessitano di livellamento del sistema di relazione gambe, bacino, rachide per distribuire i carichi corporei e migliorare le funzioni corporee;
- Che necessitano di allineamento posturale per migliorare il controllo del tronco al fine di massimizzare la funzione coordinata degli arti superiori (es. propulsione);
- Che necessitano di allineamento posturale per stabilizzare il bacino, l'arto plegico ed il tronco al fine di massimizzare la funzione di spinta (es. propusione a piede);
- Che necessitano di bilanciare i carichi corporei antero posteriori laterali e/o bilaterali (es. fissità d'anca, amputazione laterale/bilaterale).

L'unità posturale deve essere utilizzata con una qualsiasi base di sostegno/carrozzina opportunamente fissata attraverso idonei sistemi aggrappanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ogni unità posturale Inserto Impulso include:

- Kit strutturale composto da una base piatta di costruzione e 12 inserti in polietilene a celle chiuse e densità differenziata, personalizzabili e modificabili, utili a sostenere o correggere nel tempo la postura del bacino in maniera individuale per ogni singolo utente.
- Imbottitura biaccoppiata, lavabile con detergente neutro, composta da uno strato superiore di memory foam ed uno strato inferiore nella sola zona posteriore di schiuma poliuretanica espansa flessibile.
- Fodera di rivestimento New 3D areata, incontinente, ignifuga, antibatterica; lavabile in acqua tiepida con detergente neutro. Si sconsiglia di utilizzare macchine per l'asciugatura. Il materiale non prevede l'impiego di sostanze disinfettanti.

RICAMBI

Base piatta di costruzione Fodera di rivestimento Kit di imbottitura

AVVERTENZE


L'Unità posturale Inserto Seat Impulso, nella sua integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione (kit strutturale, Kit imbottitura, Rivestimento) può essere semplicemente adattata alle misure/morfologia/ deformità dell'utilizzatore. Questo tipo di operazioni rendono la messa in servizio riferibile a quella di un dispositivo di fabbricazione di serie In alternativa

La messa in servizio della Unità Posturale Inserto Seat Impulso, priva o modificata anche parzialmente della integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione approntata e costruita secondo la prescrizione scritta da parte dell'operatore professionale in funzione dell'anatomia/ morfologia/deformità dell'utilizzatore attraverso rilievo delle sue misure e prove dirette, è riferibile a quella di un dispositivo fabbricato su misura

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.versainserto.com





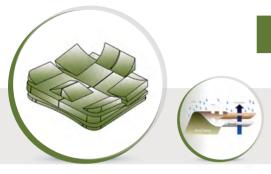

Inserto Impulso 12 INSERTI MODULARI MODIFICABILI

12 INSERTI MODULARI MODII ICADIL


FODERA "NEW 3D" ELASTICA, INCONTINENTE, AREATA.

° Ogni kit posturale è da ordinare in base alla misura della carrozzina/dispositivo di trasporto.

TABELLA MISURE INSERTO IMPULSO					MISURE (cm.)	
MODELLO	XS	XS1S	XS1	S	M1S	XL
Larghezza Effettiva (cm)	36	40	40	42	45	48
Larghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	38	42	42	44	47	50
Largh. Min ottenibile con asportazione materiale (cm)	34	38	38	40	43	46
Lunghezza Effettiva (cm)	42	40	45	45	45	50
Lunghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	44,5	42,5	47,5	47,5	47,5	52,5
Lunghezza Min ottenibile con regolaz. tagli posteriori e rimozione inserti (cm)*	36	34	39	39	39	44
Range Min e Max altezza anteriore base piatta costruz+inserti allogg gambe 6 (cm)**	4,5 / 6,5 ** altezze riferite ai modelli XS e XL					
Range Min e Max altezza posteriore base piatta costruz 5 +inserti post livell bacino 3 + inserti supp coccigeo 4 (cm)**	8,5 / 12	** altezze riferite ai modelli XS e XL				
Peso unità posturale (min/max): 1.2kg / 1.9kg						

^{*} possibili ulteriori riduzioni a mezzo asportazione materiale

[°] Portata Max. riferita al modello XL (48cmx50cm) : 135 kg

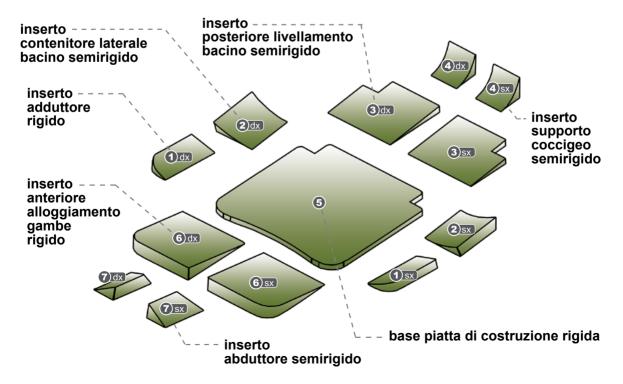

N. REG. MINISTERO: 1419827



IMPULSO ® SEATO

Personalizzazioni Impulso





ARTO PLEGICO/MONCONE DIFFERENTE APPOGGIO




REGOLAZIONE APPOGGI TROCANTERICI PER IPERCARICO ISCHII



OBLIQUITÀ PELVICA



RETROVERSIONE BACINO E ANTIVERSIONE

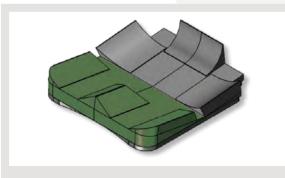

BILANCIAMENTO AMPUTAZIONE BILATERALE

PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

Kit di costruzione della seduta individuale





LA SOLUZIONE INNOVATIVA

Una gamma sviluppata per rispondere alle esigenze posturali individuali dell'utente (come da prescrizione) in esiti di molteplici patologie per l'intero ciclo di vita di utilizzo. Al fine del mantenimento delle sue caratteristiche è necessario controllare periodicamente lo stato di conservazione ed usura di tutte le parti che compongono il dispositivo ivi inclusi i sistemi aggrappanti. L'unità posturale viste le dimensioni ed il peso risulta facilmente trasportabile.

1 ADATTABILITÀ UOMO/DONNA

Finalmente la soluzione che fa la differenza, vestibilità personalizzata.

2 ADATTABILITÀ ALL'ANATOMIA E MORFOLOGIA INDIVIDUALE

Infinite possibilità per realizzare la soluzione posturale customizzata.

3 PTS PELVIC TOTAL SUPPORT

Perfetta aderenza all'anatomia del bacino e dei segmenti corporei ad esso correlati. Induce la risposta attiva del sistema muscolo scheletrico. La distribuzione dei carichi fornita dal PTS riduce lo stress meccanico nei tessuti profondi ed introduce benefici nella prevenzione delle ulcere da ipercarico pressorio.

4 IMBOTTITURA FORME LIBERE

L'innovativa imbottitura modulare per immergersi nel massimo comfort con protezione sicura.









PRODOTTO DA:




Via Montagna Z.I. - Lotto 41 72023 Mesagne (BR) - ITALY Tel. +(39) 0831 777840 Fax. +(39) 0831 730739 Email: sales@promedicare.it www.versainserto.com www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485 N° 279412 / N° 279411





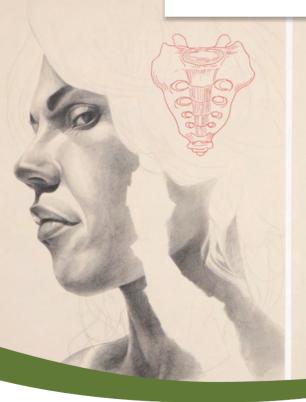



DISTRIBUITO DA:

CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserto.com