


TThinking

TANTO
inserto[®]
SEAT


SEAT

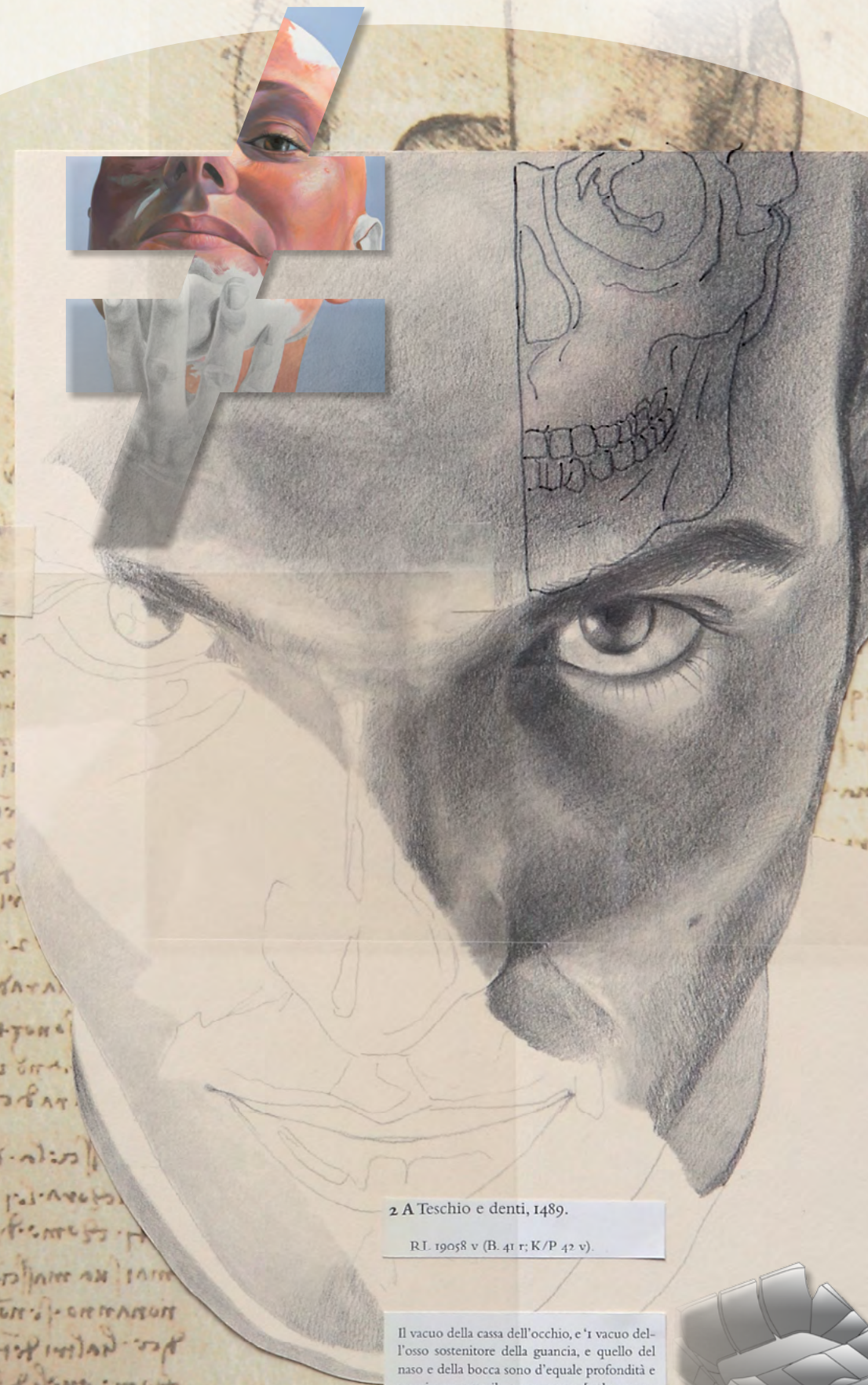

2 A Teschio e denti, 1489.

R.I. 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e 'i vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.

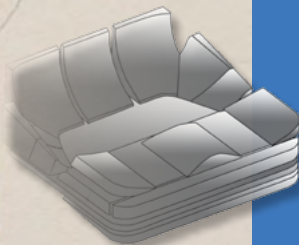

UNA NUOVA SOLUZIONE
PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

UNA NUOVA SOLUZIONE PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE

Kit di costruzione della seduta individuale Perfetta ricostruzione delle forme anatomiche




Perchè Tanto ?

- FACILITA L'AUTOSPINTA
- STABILIZZANTE
- SICURO



**KIT STRUTTURALE
MODULARE E MODIFICABILE
A DENSITÀ DIFFERENZIATA**

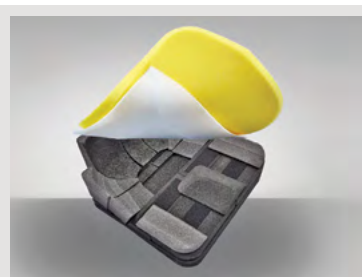

**KIT DI IMBOTTITURA
Forme Libere**



**STRAORDINARIO
CONTROLLO DEL TRONCO**

INDICAZIONI CLINICHE / DESTINAZIONE D'USO

L'unità posturale bacino Inserto Seat Tanto è consigliata preferibilmente ma non esaustivamente per utenti non deambulanti, con discrete deformità e con una elevata necessità di contenimento posturale e di stabilizzazione del tronco in particolare:

PTS Pelvic Total Support

- Che presentano asimmetrie, colpi di vento, obliquità e rotazioni pelviche, anteroversioni e retroversioni pelviche, adduzioni ed abduzioni delle gambe, di entità media/alta;
- Che necessitano di un intervento di stabilizzazione degli ischi;
- Che necessitano di sospensione ischiatica, trocanterica, coccigea e sacrale;
- Che sono soggetti ad un alto rischio di sviluppare piaghe da decubito;
- Che necessitano di livellamento e contenimento del sistema di relazione gambe, bacino, rachide;
- Che necessitano di controllo laterale delle gambe e coccigeo/sacrale/lombare per migliorare il controllo del tronco al fine di massimizzare la funzione coordinata degli arti superiori (es. propulsione).

L'unità posturale deve essere utilizzata con una qualsiasi base di sostegno/carrozzina opportunamente fissata attraverso idonei sistemi aggiranti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ogni unità posturale Inserto Tanto include:

- Kit strutturale a densità differenziata composto da una base piatta di costruzione e da una serie di 17 inserti in polietilene a celle chiuse, personalizzabili e modificabili, utili a sostenere o correggere in tempo la postura del bacino individualmente.
- kit di imbottitura Forme Libere, lavabile con detergente neutro, composto da uno strato superiore di memory foam ed uno strato inferiore nella sola zona posteriore di schiuma poliuretanicca espansa flessibile.
- Fodera di rivestimento New 3D areata, incontinente, ignifuga, antibatterica; lavabile in acqua tiepida con detergente neutro. Si sconsiglia di utilizzare macchine per l'asciugatura. Il materiale non prevede l'impiego di sostanze disinfettanti.

RICAMBI

- Base piatta di costruzione
- Fodera di rivestimento
- Kit di imbottitura

AVVERTENZE


L'Unità posturale **Inserto Seat Tanto**, nella sua integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione (kit strutturale, Kit imbottitura, Rivestimento) può essere semplicemente adattata alle misure/morfologia/deformità dell'utilizzatore. Questo tipo di operazioni rendono la messa in servizio riferibile a quella di un dispositivo di fabbricazione di serie.

In alternativa

La messa in servizio della Unità Posturale **Inserto Seat Tanto**, priva o modificata anche parzialmente della integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione approntata e costruita secondo la prescrizione scritta da parte dell'operatore professionale in funzione dell'anatomia/morfologia/deformità dell'utilizzatore attraverso rilievo delle sue misure e prove dirette, è riferibile a quella di un dispositivo fabbricato su misura.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.versainserito.com



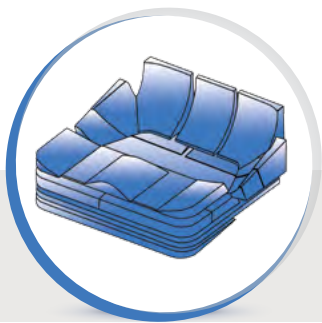

Inserto Tanto

17 INSERTI MODULARI MODIFICABILI


FODERA "NEW 3D" ELASTICA, INCONTINENTE, AREATA.

° Ogni kit posturale è da ordinare in base alla misura della carrozzina/dispositivo di trasporto.


TABELLA MISURE INSERTO TANTO	PEDIATRICO						ADULTO				MISURE (cm.)	
MODELLO	US	XXS	XS	XS1S	XS1	S	M	M1S	M1	L	XL	
Larghezza Effettiva (cm)	30	36	36	40	40	42	42	45	45	48	48	
Larghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	32	38	38	42	42	44	44	47	47	50	50	
Largh. Min ottenibile con asportazione materiale (cm)	28	34	34	38	38	40	40	43	43	46	46	
Lunghezza Effettiva (cm)	38	38	42	40	45	45	50	45	50	45	50	
Lunghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	40,5	40,5	44,5	42,5	47,5	47,5	52,5	47,5	52,5	47,5	52,5	
Lunghezza Min ottenibile con regolazione tagli posteriori e rimozione o lavorazione inserti (cm)*	32	32	36	34	39	39	44	39	44	39	44	
Range Min e Max altezza anteriore base piatta costruz+inserti alloggi US e XL**	3,5 / 4,5		** altezze riferite ai modelli US e XL									
Range Min e Max altezza posteriore base piatta costruz+inserti contenit later post bacino 9+11 (cm)**	15 / 19,5		** altezze riferite ai modelli US e XL									
Peso unità posturale min/max: 0,8 kg/2,9 kg												

* possibili ulteriori riduzioni a mezzo asportazione materiale


° Portata Max. riferita al modello XL (48cmx50cm) : 135 kg

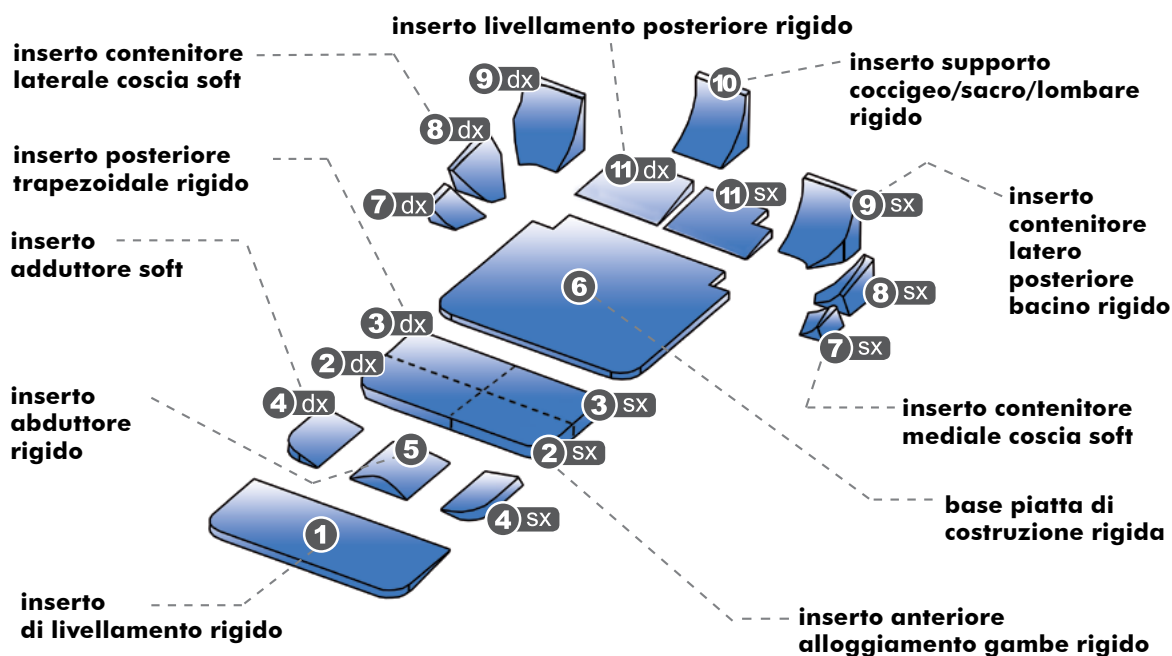


Personalizzazioni Tanto

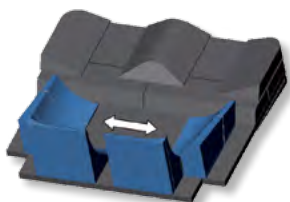


REGOLAZIONE APPOGGI
TROCANTERICI PER IPERCARICO ISCHII

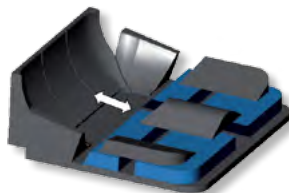


ANTISCIVOLAMENTO BACINO

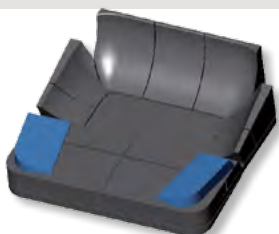

ADDUZIONE PER FACILITARE AUTOSPINTA

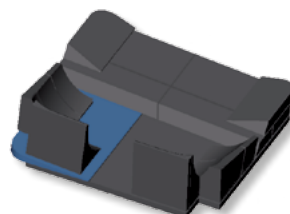


OBLIQUITÀ PELVICA

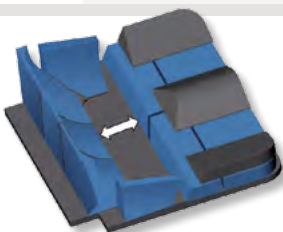

RETROVERSIONE BACINO E
ANTIVERSIONE



ROTAZIONE BACINO

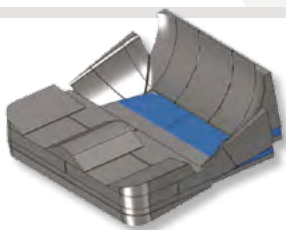

CHIUSURA ANGOLO TRONCO E BACINO

PERSONALIZZABILE
INDIVIDUALMENTE

Kit di costruzione della
seduta individuale



LA SOLUZIONE INNOVATIVA

Una gamma sviluppata per rispondere alle esigenze posturali individuali dell'utente (come da prescrizione) in esiti di molteplici patologie per l'intero ciclo di vita di utilizzo. Al fine del mantenimento delle sue caratteristiche è necessario controllare periodicamente lo stato di conservazione ed usura di tutte le parti che compongono il dispositivo ivi inclusi i sistemi aggrappanti. L'unità posturale viste le dimensioni ed il peso risulta facilmente trasportabile.

www.versainserito.com

1 ADATTABILITÀ UOMO/DONNA

Finalmente la soluzione che fa la differenza, vestibilità personalizzata.

2 ADATTABILITÀ ALL'ANATOMIA E MORFOLOGIA INDIVIDUALE

Infinite possibilità per realizzare la soluzione posturale customizzata.

3 PTS PELVIC TOTAL SUPPORT

Perfetta aderenza all'anatomia del bacino e dei segmenti corporei ad esso correlati. Induce la risposta attiva del sistema muscolo scheletrico. La distribuzione dei carichi fornita dal PTS riduce lo stress meccanico nei tessuti profondi ed introduce benefici nella prevenzione delle ulcere da ipercarico pressorio.

4 IMBOTTITURA FORME LIBERE

L'innovativa imbottitura modulare per immergersi nel massimo comfort con protezione sicura.





TANTO
inserto
S E A T

PRODOTTO DA:



Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Fax. +(39) 0831 730739
Email: sales@promedicare.it
www.versainserto.com
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485
N° 279412 / N° 279411

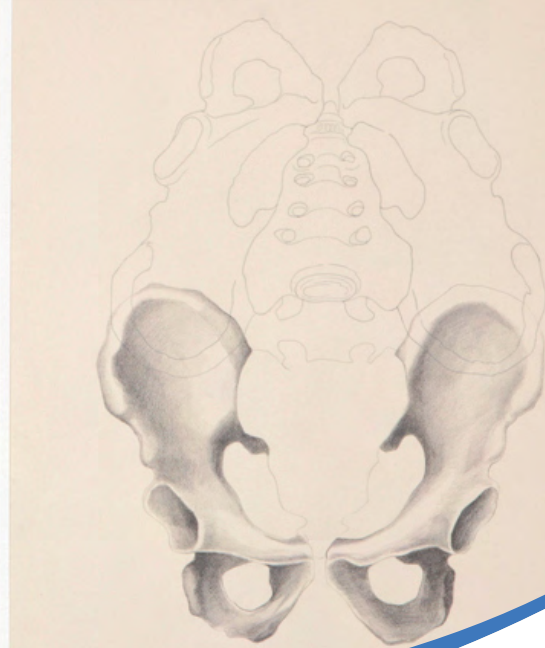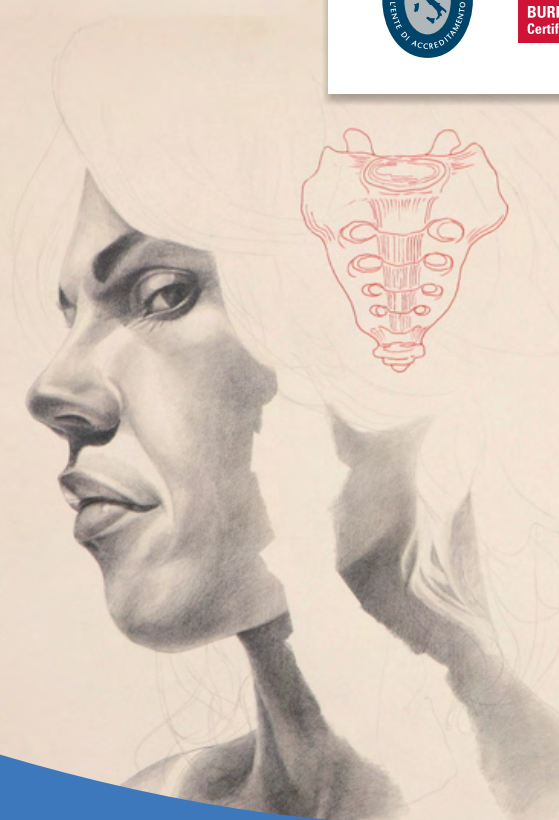

DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserto.com