

2 A Teschio e denti, 1489.

RL 19058 v (B. 41 r; K/P 42 v).

Il vacuo della cassa dell'occhio, e'r vacuo dell'osso sostenitore della guancia, e quello del naso e della bocca sono d'eguale profondità e terminano sotto il senso comune [sede centrale delle sensazioni] per linea perpendicolare. E ciascuna d'esse vacuità ha tanto di profondità quant'è la terza parte del volto dell'omo, cioè dal mento a capegli.



UNA NUOVA SOLUZIONE TTS TRUNK TOTAL SUPPORT

Kit posturale per il tronco ad inserti modulari



Perchè Vip ?

- PRIVO DI HARDWARE E SCOCCA METALLICA
- DOTATO DI SISTEMA TENSIONABILE A FASCE
- ULTRALEGGERO, CONFORTEVOLE, SICURO
- MASSIMA AVVOLGENZA, SOSTEGNO E CONTROLLO DEL TRONCO



KIT STRUTTURALE
CON BASE PIATTA
E 2 INSERTI



IMBOTTITURA IN SCHIUMA
POLIURETANICA IN
MEMORY FOAM



FODERA DI RIVESTIMENTO
MICROCLIMATICA

INDICAZIONI CLINICHE E D'USO

- Utenti non deambulanti con moderata/alta instabilità del tronco che necessitano di supporto
- Utenti con scarso controllo del tronco

TTS FORME ACCOLTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit strutturale composto da una base piatta di costruzione e 2 inserti in polietilene a celle chiuse, personalizzabili e modificabili, utili a sorreggere e sostenere o correggere nel tempo la postura del tronco individualmente
- Imbottitura in schiuma poliuretanicica in memory foam
- Fodera di rivestimento microclimatica traspirante, ignifuga e antibatterica
- Sistema di tiranti tensionabili a fasce da 10 cm per installarlo su carrozzina

RICAMBI

- Base piatta di costruzione
- Imbottitura
- Fodera di rivestimento
- Sistema tensionabile

AVVERTENZE

L'Unità Posturale **Inserito Back Vip**, nella sua integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione (Kit strutturale, Imbottitura, Rivestimento) può essere semplicemente adattata alle misure/morfologia/deformità dell'utilizzatore. Questo tipo di operazioni rendono la messa in servizio riferibile a quella di un dispositivo di fabbricazione di serie.

In alternativa

La messa in servizio dell'Unità Posturale **Inserito Back Vip**, priva o modificata anche parzialmente della integrità di design ed interezza numerica e dimensionale di componenti in dotazione approntata e costruita secondo la prescrizione scritta da parte dell'operatore professionale in funzione dell'anatomia/morfologia/deformità dell'utilizzatore attraverso rilievo delle sue misure e prove dirette, è riferibile a quella di un dispositivo fabbricato su misura.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.versainserto.com




VIP



Inserto Vip

2 INSERTI PERSONALIZZABILI
E MODIFICABILI

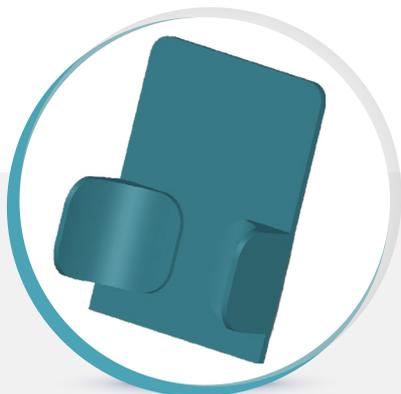

FODERA DI
RIVESTIMENTO
MICROCLIMATICA
E TRASPIRANTE

° Ogni kit posturale è da ordinare in base alla misura della carrozzina/dispositivo di trasporto.

TABELLA MISURE INSERTO VIP										MISURE (cm)	
MODELLO	3235	3438	3642	3845	4045	4245	4250	4545	4550	4850	5050
Larghezza effettiva schienale	27	29	31	33	35	37	37	40	40	43	45
Altezza effettiva scocca	35	38	42	45	45	45	50	45	50	50	50
Larg. est-est tubi carrozzina (cm) min/max	31/35	33/37	35/39	37/41	39/43	41/45	41/45	44/48	44/48	47/51	49/53

Inserto di contenimento avvolgenza lombare semirigido



Inserto di contenimento avvolgenza lombare semirigido



Base piatta di costruzione rigida

1

2 SX



PRODOTTO DA:



Via Montagna Z.I. - Lotto 41
72023 Mesagne (BR) - ITALY
Tel. +(39) 0831 777840
Fax. +(39) 0831 730739
Email: sales@promedicare.it
www.versainserto.com
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI
GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485



ISO 9001
ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



DISTRIBUITO DA:



CE GARANZIA 2 ANNI

www.versainserto.com