



- Scheda Tecnica Dispositivo Posturale H-ONE

	Dro Madiogra c r l
<u>Identificazione Fabbricante</u>	Pro Medicare s.r.l.
	Via Montagna Z.I. Lotto 41
	72023 Mesagne (Br)
	P IVA 01803920741
	Tel 0039 0831 777840 Fax 0039 0831 730739
	www.promedicare.eu email: info@promedicare.it
Nome dispositivo:	H-ONE Posizionatore Modulare Capo/Collo in Posizione Prona
Destinazione d'uso:	Sistema di posizionamento modulare per pronazione capo e collo da utilizzare su un materasso.
Codice dispositivo	D00-007-1
Numero di registrazione Ministero/Repertorio	2013828/R
Codice di classificazione (CND)	V0899
Caratteristiche principali:	Il sistema di posizionamento H-ONE è marcato CE secondo il regolamento 2017/745 ed è un dispositivo medico di classe I non sterile. DESCRIZIONE: Il sistema di posizionamento H-ONE è caratterizzato da una
	struttura modulare e si compone di quattro elementi indipendenti la cui superficie inferiore ha proprietà antiscivolo e di un tappetino flessibile come base d'appoggio, anche esso antiscivolo. UTILIZZO: L'utilizzo del sistema è consentito in seguito alle indicazioni del personale sanitario e ai protocolli della struttura sanitaria riguardanti la mobilizzazione ed il posizionamento dei pazienti. Le operazioni di messa in servizio e regolazioni successive devono essere eseguite esclusivamente e sono sotto la responsabilità dell'Utilizzatore Professionale. INDICAZIONI:
	 Il sistema di posizionamento H-ONE è stato concepito per: Sostenere, posizionare, mobilizzare e riposizionare il collo e il capo di un paziente pronato su un materasso, adattandosi in maniera personalizzata alle forme, dimensioni,inclinazioni,rotazioni nelle condizioni cliniche in cui si rende necessario; Distribuire omogeneamente le pressioni e/o scaricare i punti critici come necessario (es.volto,orecchie) Favorire l'appoggio individualizzato e rilassato del collo e capo del paziente;
	 Prevenire i traumi facciali e le UDP Gestire le contratture e gli edemi PRESTAZIONI E DURATA: Il sistema di posizionamento H-ONE può essere utilizzato su un solo paziente sino a deterioramento. Il dispositivo non è riparabile. MATERIALI:
	Gli elementi del sistema sono realizzati con schiume Poliuretaniche e Polietileniche di differenti caratteristiche, densità, portanza e memoria di forma. Il rivestimento ed il tappetino flessibile sono realizzati in materiale a composizione combinata PU/PES con le seguenti caratteristiche: — antibatterico secondo la norma ISO 20743-2 (Staphylococcus aureus, Methicilin Resistan Staphylococus Aureus MRSA) — non citotossico secondo la norma ISO 10993-5 e ISO 10993-12

- non irritante secondo la norma ISO 10993-10 e ISO 10993-1
- resistente alla penetrazione di virus secondo la norma ISO 16604
- antifungo secondo ASTM G 21-96
- ignifugo secondo la standard BS 7175; crib 5
- biocompatibile secondo la ISO 10993
- certificato OEKO-TEX®
- privo di lattice
- traspirante secondo lo standard ISO 15496
- impermeabile secondo lo standard EN 20811

PULIZIA E MANUTENZIONE

Il rivestimento non removibile è igienizzabile con i seguenti detergenti/disinfettanti:

- PERSIL EXPERT coldzyme / HENKEL
- 70% etanol
- PERFORM / Schuelke
- TPH PROTECT / Schuelke
- MIKROZID AF liquid / Oktal pharma
- INCIDIN PLUS / Ecolab
- DESCOGEN liquid / Antiseptica
- MANORAPID / Antiseptica
- PLIVASEPT / Pliva
- NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI PRODOTTI A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO

CONFEZIONAMENTO:

Il sistema di posizionamento H-ONE viene confezionato in busta singola.

KIT DI CONSUMO:

E' disponibile un kit di traversine in TNT monouso 100% polipropilene, idrorepellente e traspirante, non irritante e non citotossico. Detto Kit è confezionato in busta ed è ordinabile separatamente. L'utilizzo delle foderine/traversine non è obbligatorio ma suggerito.

Immagine prodotto:



Peso e dimensioni

Il sistema di posizionamento H-ONE ha un peso complessivo di 700 gr. ed è utilizzabile su pazienti adulti e adolescenti con altezza superiore a 160 cm (previa verifica delle dimensioni del materasso)